



Ficha Técnica
Technical Data Sheet

**BOLSAS FRIO CALOR/
COLD/ HOT PACK**

Característica(s) principal(es)/
Main feature(s)

Bolsas de frío calor reutilizables /
Cold/ hot reusable pack.

Material(es)/
Material(s)

Composición del gel: agua, glicerol, carboximetilcelulosa, ácido poliacrílico, sal sódica, 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona/
Gel composition: water, glycerol, carboxymethyl cellulose, polyacrylic acid, sodium salt, 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one.

Descripción del producto/
Product description

Gel no tóxico / Non - toxic gel.
Peso bolsas / Pack weight: 450 g

Recomendaciones de uso/
Recommendations for use

FRÍO / COLD		CALOR / HEAT	
<p>Colocar la bolsa en el congelador. Dependiendo del efecto deseado (bolsa flexible o rígida) el tiempo que requiere la bolsa en el congelador y la temperatura recomendada varían. La bolsa permanecerá flexible siempre y cuando la almacene por encima de -18°C. Por debajo de -18°C el gel empezará a congelarse. / Place the bag in the freezer. Depending on the desired effect (flexible or rigid bag) the time required for the pack in the freezer and the recommended temperature vary. The pack will remain flexible as long as it is stored upper -18°C. Below -18°C the gel will start to freeze.</p>		<p>Calentar la bolsa al baño maría hasta que hierva, o en el microondas sumergido completamente en agua durante 3 minutos (600W). / Heat the pack using bain-marie technique, or heat in the microwave immersing the pack completely in water for 3 minutes (600W).</p>	
	Tª congelador recomendada / Freezer recommended Tº	Tiempo mínimo / Minimum time	
Bolsa flexible / Flexible pack	-15°C	6 h	
Bolsa rígida / Rigid pack	-24°C	72 h	
<p>Debe cubrirse la bolsa con una toalla antes de la aplicación sobre la piel <i>The pack should be covered with a towel to be applied above the skin.</i></p>			

Uso previsto/
Expected use

Terapia / Therapy.
Frío: propiedades analgésicas y antiinflamatorias / Cold: analgesic and anti-inflammatory properties
Calor: relaja y fomenta la circulación sanguínea / Heat: relaxes and promotes blood circulation.

Información comercial/
Commercial information

Ref./REF.	Medidas (cm)/ Measures(cm)	Color/ Color	Envase individual/ Individual packaging	Contenido cajas/ Box content	EAN
41022	25,6 x 14,8 (largo x ancho/ length x width)	Azul (gel)/ Blue (gel)	No/ No	20	8430655801011

Precauciones de transporte y almacenamiento/
Transport and storage warnings

Conservar en lugar fresco y seco en recipientes bien cerrados. Almacenar lejos de los alimentos /
Store in cool, dry conditions in well sealed receptacles. Store away from foodstuffs.

Gestión de la calidad/
Quality management

Council Directive 93/42/CEE concerning medical devices
Marcado CE en cada envase. CE marking on each packaging level.
Clasificación según Anexo IX del RD 1591/2006: Clase I /
CE classification according to RD 1591/2006: Class I.

Vida útil/
Shelf life

4 años / 4 years.

Simbología aplicable/
Applicable symbols



Fecha última actualización/
Date of last updating

Febrero 2.018/ February 2.018

Contacto/ Contact



www.fisaude.es
+ 34 916 32 77 40.



PORTALWEB FISAUDE SL
B32403495
Calle Constitución 124
28946 Fuenlabrada, Madrid
91 632 77 40
tienda@fisaude.com