

## SONDA RECTAL UNIDIX

Sonda rectal semirrígida fabricada en PVC de uso médico para la limpieza del recto.

Indicada también para favorecer/estimular la expulsión de gases e instilación líquidos o medicamentos.

Catéter con longitud adecuada para insertar desde el ano hasta el recto.

Empaquetadas individualmente y esterilizadas por Óxido de Etileno.

Un solo uso, desechables. 100% libres de látex y DEHP.



### Propiedades Punta

Tipo Nelaton.

- Roma, recta y cerrada.
- Dos orificios laterales

### Propiedades Sonda

Composición PVC.

- Apariencia: Transparente.



### Propiedades Conector

Composición PVC.

- Indicador del calibre de la sonda.
- Código de colores.

## MODO DE EMPLEO DE LA SONDA RECTAL UNIDIX

- › Seleccionar el calibre deseado y extraer del envase individual manteniendo su esterilidad.
- › Si es preciso lubricar la punta y cuerpo, e introducir a través del ano hasta el recto (direccionada hacia el ombligo)
- › Mantener la sonda estabilizada o retirar según prescripción.
- › Para su retirada simplemente extraer del cuerpo y desechar.

## BENEFICIOS

- › Material que ofrece flexibilidad y a la vez rigidez para su fácil manipulación.
- › Resistente a la torsión.
- › Catéter transparente que permite ver el interior de la sonda en todo momento.
- › Conector codificado por colores para su rápida identificación según calibre.
- › Superficie tratada para facilitar la inserción.
- › Punta redondeada para un resultado atraumático para el paciente.
- › Material biocompatible y 100% exento de látex y DEHP.

## DIMENSIONES, REFERENCIAS Y CÓDIGOS DE BARRAS.

Cajas de 100 unidades.

Ch/Fr	∅ externo (±0.10mm)	Longitud total (±10mm)	REF	UDS	EAN13
18		400 mm	768300418	100	8435195321371
				600	8435195331448
20			768300420	100	8435195321388
				600	8435195331455
22			768300422	100	8435195321395
				600	8435195331462
24			768300424	100	8435195321470
				600	8435195331479
26			768300426	100	8435195321487
				600	8435195331486
28		768300428	100	8435195321494	
			600	8435195331493	
30		768300430	100	8435195321500	
			600	8435195331509	
32		768300432	100	8432229240134	
			600	8432229340131	