

# F808



## Equipo de peeling ultrasónico y Corriente galvánica

Tratamiento diseñado para limpiar profundamente la piel, eliminando células muertas y capa córnea; mediante una espátula que genera ondas ultrasónicas, y produce vibración que en contacto con el tejido nos ayuda a arrastrar todos los residuos, así como favorecer la estimulación de la piel, y la hidratación con la corriente galvánica. La combinación de corriente galvánica con corriente ultrasónica logra un nivel más profundo de penetración de productos, promoviendo la circulación sanguínea facial, mejorar los problemas de flacidez de la piel y la nutrición celular.

### Corriente Galvánica

Es una corriente continua, que implica un flujo sostenido de electrones desde el polo negativo al positivo, sin cambio de polaridad y con la intensidad adecuada a tolerancia del cliente. Es utilizada principalmente en un proceso llamado Iontoforesis, que no es más que la penetración de un producto de carga igual al electrodo utilizado, lo que va a facilitar la penetración de activos. El principio es el siguiente, cargas iguales se repelen, y cargas opuestas se atraen, si se aplica una corriente galvánica (-) a un producto ionizable de carga (-) el producto va a rechazar la corriente y va a ir en dirección contraria a la misma, es decir va a penetrar en la piel, esta será la principal función de la corriente galvánica, así como también es utilizada para realizar tratamientos de limpieza facial profunda. Es importante que los productos utilizados sean ionizables, para ello debemos ver en el empaque que carga es el producto si (+) o (-), de esta manera sabremos con qué tipo de corriente vamos a trabajar.

El movimiento de los iones negativos y positivos de corriente directa, ayudan a que el producto hidrosoluble penetre en la piel y expulse las impurezas.

#### Polo positivo (ánodo)

- Produce reacción ácida
- Calma los nervios
- Disminuye el aporte sanguíneo
- Endurece el tejido

#### Polo negativo (cátodo)

- Produce reacción alcalina
- Estimula los nervios
- Aumenta el aporte sanguíneo
- Ablanda el tejido

# F808



En el equipo F808, podemos escoger la polaridad en la opción: (LEAD).

"I" Corriente (+) trabajaremos con un producto (+), generalmente utilizada para retirar impurezas, toxinas y penetrar productos de tipo ácido, utilizada en pieles grasas. Procesos desinflamatorios, para cerrar poros después del tratamiento facial, disminuir rojeces, como acné leve, evitar inflamación, forzar las soluciones de PH ácido, como el astringente, dentro de la piel.

"O" Corriente (-) trabajaremos con un producto (-) potencia la desincrustación utilizando una solución de PH alcalino, penetrar producto de tipo alcalino, utilizado en pieles secas y deshidratadas, penetrar mezclas solubles en agua, sustancias para desobstruir los poros, purificar la piel, para estimular la circulación sanguínea en pieles secas, para forzar la loción desincrustante, alcalina, dentro de la piel. Saponificación. Tratamiento no mayor a 1 a 4 min. Desincrustación: el proceso para ablandar y licuar los depósitos de grasa, que son acumulación de sebo en los folículos.

## Modo de uso:

- Conectar la espátula al aparato antes de encenderlo.
- Aplique el producto correctamente polarizado en la zona de piel a tratar.
- Pulse el botón "P1 MODE" para activar la función galvánica.
- Cambie la polaridad de la espátula ajustando (+) y (-). La piel del cliente debe estar limpia y seca antes de que el producto penetre en el tejido. Cuando el botón del electrodo es (+), la polaridad de la espátula es positiva mientras que el brazaletes es negativa. El profesional debe aplicar sobre la piel alguna loción de manera uniforme en la parte a tratar, para mayor conductividad. Si se realiza tratamiento desincrustante, se debe cambiar el botón del electrodo a (-), ahora la espátula es negativa y el brazaletes es positivo.
- Encienda el equipo, seleccione la polaridad del tratamiento: (+ o -), ponga "I/Energy" al mínimo. Toque la parte a tratar con la espátula, ajuste lentamente "I/Energy" la intensidad apropiada de modo que el cliente sienta un ligero hormigueo. Deslice suavemente la espátula. La piel debe mantenerla húmeda todo el tiempo para un mejor efecto.

# F808



## Scrubber (Peeling ultrasónico)

Para activar la opción de scrubber presionaremos P2. Coloque el brazalete en la muñeca del cliente, ajústela y aplique gel en la placa metálica del brazalete para la mejor conducción de la corriente, de esta manera puede comenzar a trabajar. La espátula debe estar inclinada unos 45°, si la espátula pierde contacto con la piel dejará de funcionar automáticamente. Aplique el producto conductor apropiado generosamente en la superficie de la piel. Seleccione el tipo de onda en "STATE":

**Continuo**, es una onda que no se interrumpe y es utilizada para superficies grandes, ya que de este modo la emisión de onda el manípulo se mantiene emitiendo de forma continua, lo que genera mayor intensidad del tratamiento, utilizado para pieles más gruesas, con mayor cantidad de impurezas.

**Pulsado**, utilizado en zonas pequeñas, de menor grosor y poca acumulación de suciedad ya que la emisión de onda es menor, por tanto, el efecto será menos potente y en consecuencia el trabajo será menor. También utilizado para zonas donde el tejido óseo sea más prominente.

**Combinado**, es un punto intermedio entre las dos emisiones de ondas.

Ajuste el botón "ENERGY" al nivel de intensidad deseado con las flechas (- y +). Utilice la sonda sobre la piel.

El tiempo de tratamiento es aproximadamente de unos 10-15 minutos.

Tiempo de trabajo preestablecido 15 min.

Potencia de trabajo 6 W.

La particularidad de este equipo es que podemos trabajar tanto la corriente galvánica como la función de peeling con la misma espátula, de modo combinado pulsando P1 y P2 a la vez.

## Uso combinado galvánico y por ultrasonidos:

- Coloque el brazalete en la muñeca del cliente.
- Aplique gel conductor para el área de tratamiento.
- Pulse los botones "P1 MODE" y "P2 MODE" para activar la función combinada.
- Seleccione el tipo deseado de onda (continua, pulsada o combinada), pulsando el botón "STATE". Ajuste tanto la "intensidad" y "ENERGY". a los niveles deseados.
- Utilice el manípulo sobre la piel.

# F808



## Precauciones:

- Después del tratamiento, la espátula deberán limpiarse y mantenerse seca para evitar daños.
- Cuando se trabaje con el polo negativo, la sensación de escozor será más intensa que cuando esté en positivo. En positivo la sensación es más débil.
- Antes de realizar el tratamiento, los clientes deberán quitarse las joyas. No puede ser utilizado con personas que lleven objetos metálicos en el cuerpo.
- Las mujeres embarazadas y personas que tengan la piel dañada, inflamada, sensible o con expansión de capilares no podrán hacerse este tratamiento.
- La polaridad de trabajo debe ser usada según la polaridad del producto (negativo o positivo). Si la polaridad es positiva, la loción debería ser ácida (+), si es negativa, la loción deberá ser alcalina (-). Por favor utilice el papel de PH para comprobar si la loción es la indicada.